




# Assistant Parole CAA pour iOS

## Manuel d'utilisation de base

Un manuel d'utilisation plus complet (en anglais) est disponible à [www.asoft.nl](http://www.asoft.nl)



## 1. Interface

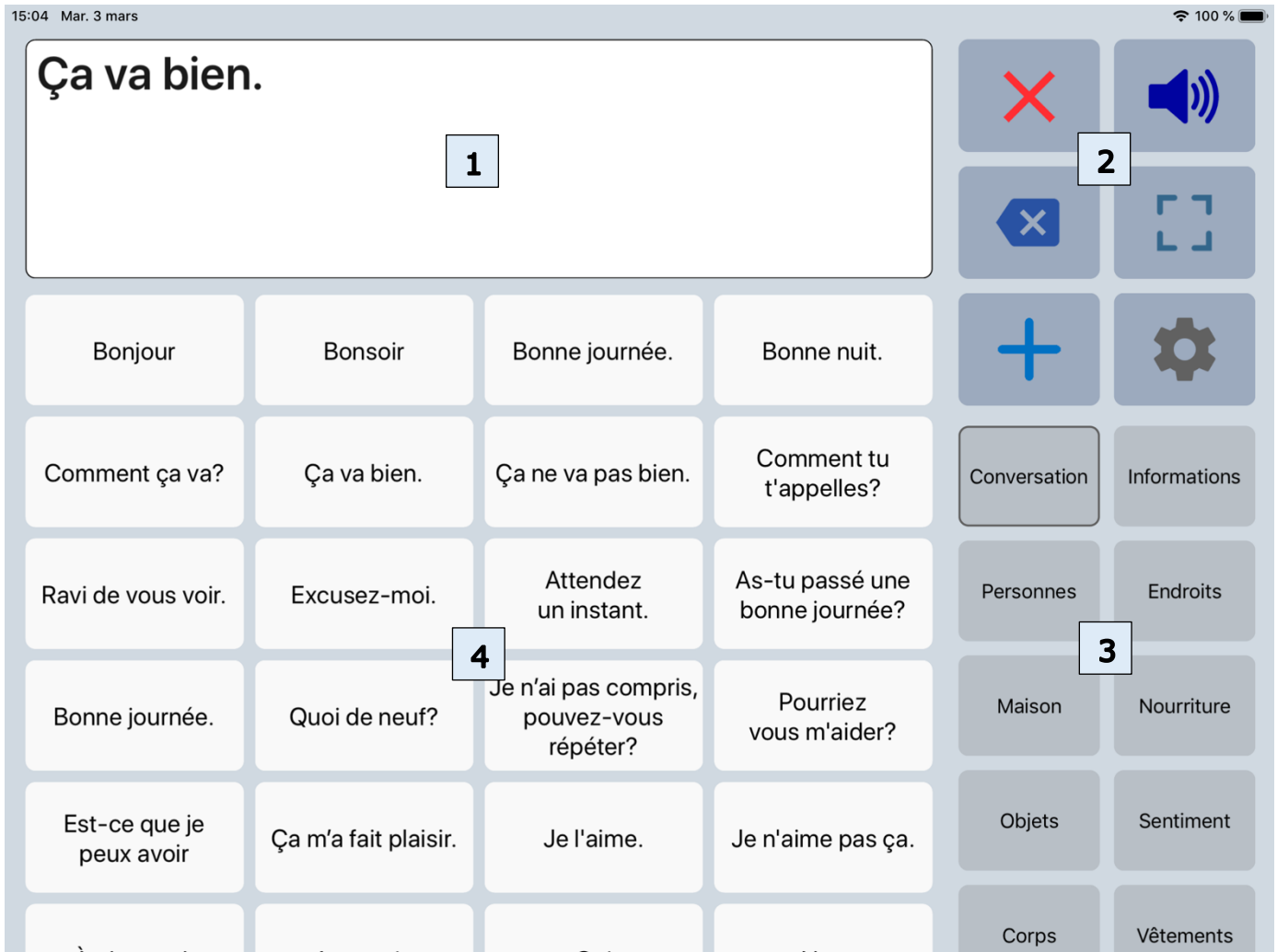


L'interface de l'écran principal se compose de 4 zones: la zone de texte et 3 zones avec des boutons, que vous pouvez faire défiler.

1	Zone de texte	Votre message apparaît dans la zone de texte. Lorsque vous appuyez sur dans la zone de texte, le clavier à l'écran apparaît.
2	Boutons d'action	Il y a 12 boutons d'action. Les 6 premiers boutons sont toujours visibles, les autres boutons peuvent être rendus visibles en faisant défiler vers le bas les boutons d'action.
3	Catégories	Zone avec les catégories.
4	Phrases	Zone avec les phrases appartenant à la catégorie sélectionnée.



## 2. Boutons d'action

### Aperçu

	Parler	Prononce le texte dans la zone de texte.
	Effacer tout	Efface la zone de texte.
	Effacer mot	Efface le dernier mot de la zone de texte.
	Plein écran	Affiche le message dans la zone de texte en plein écran.
	Ajouter	Menu d'ajout: Nouvelle phrase, Enregistrer phrase actuelle, Nouvelle catégorie.
	Paramètres	Ouvre le menu des paramètres.
	Modifier Phrase	Modifiez la dernière phrase cliquée.
	Attention Sonore	Le son peut être sélectionné dans les paramètres 'Parole et son'.
	Partager Phrase	Partagez la phrase par e-mail, texte ou réseaux sociaux.
	Retourner le texte	Retournez le texte pour montrer votre message à la personne en face de vous.
	Clavier à l'écran	Ouvre le clavier à l'écran.
	Utilisateurs	Basculez entre les profils utilisateur.
	Réorganiser phrases	Réorganisez les boutons avec des phrases (par glisser-déposer).



### 3. Modifier phrases

#### Modifier en appuyant longuement sur un bouton

#### Modifier phrase

Café au lait s'il vous plaît.

Étiquette:

café au lait

Catégorie / position:

Personnes	Pos: 8	du lait
Endroits	Pos: 9	du café
Maison	Pos: 10	du lait
Nourriture	Pos: 11	café au lait
Objets	Pos: 12	du jus de pomme
Sentiment	Pos: 13	du jus d'orange
Corps	Pos: 14	du lait

[Annuler](#) [Supprimer](#) [Enregistrer](#)

**Phrase:** La phrase qui est parlée et / ou est placée dans la zone de texte.

**Étiquette:** Le texte qui est placé sur le bouton. Si l'étiquette est vide, la phrase sera placée sur le bouton.

**Catégorie / position:** Pour modifier la catégorie et la position.

**Bouton Couleur:** pour changer la couleur du bouton.

**Bouton Image:** Affiche les options pour sélectionner une image (dans votre photothèque), pour sélectionner un Emoji ou prendre une photo. L'image sera placée sur le bouton à côté du texte.

**Bouton Enregistreur:** Affiche l'écran de l'enregistreur où vous pouvez effectuer un enregistrement vocal qui sera joué lorsque vous appuyez sur le bouton de phrase sur l'écran principal. Il est également possible de sélectionner un enregistrement vocal effectué précédemment.



#### Enregistreur vocal

Enregistrement:

Comment ça va?.m4a

[Désélect](#)

0.0

[Annuler](#) [Ok](#)



### 3. Modifier phrases

#### Modifier dans les paramètres

Si vous accédez aux paramètres 'Catégories et phrases', puis choisissez Catégories, puis sélectionnez une catégorie, la liste de toutes les phrases appartenant à la catégorie sélectionnée s'affiche.

**Modifier** : Mode édition où vous pouvez changer toutes les phrases en une seule fois.

**++** : Affiche l'écran où vous pouvez ajouter jusqu'à 10 phrases en une seule fois.

**+** : Affiche l'écran où vous pouvez ajouter une phrase.

Liste:

Retour	Modifier	++	+
Bonjour			
Bonsoir			
Bonne journée.			
Bonne nuit.			
Comment ça va?			
Ça va bien.			
Ça ne va pas bien.			
Comment tu t'appelles?			
Ravi de vous voir.			
Excusez-moi.			
Attendez un instant.			
As-tu passé une bonne journée?			
Bonne journée.			

Modifier:


Retour	Supprimer (4)	Couleur (4)	Enregistrer
<input type="radio"/>	Bonjour		
<input checked="" type="radio"/>	Bonsoir		
<input checked="" type="radio"/>	Bonne journée.		
<input checked="" type="radio"/>	Bonne nuit.		
<input checked="" type="radio"/>	Comment ça va?		
<input type="radio"/>	Ça va bien.		
<input type="radio"/>	Ça ne va pas bien.		
<input type="radio"/>	Comment tu t'appelles?		
<input type="radio"/>	Ravi de vous voir.		
<input type="radio"/>	Excusez-moi.		
<input type="radio"/>	Attendez un instant.		
<input type="radio"/>	As-tu passé une bonne journée?		
<input type="radio"/>	Bonne journée.		

- Vous pouvez sélectionner plusieurs phrases et changer la couleur des phrases sélectionnées ou supprimer les phrases sélectionnées.
- Par glisser-déposer sur les 3 lignes horizontales, l'ordre des phrases peut être modifié.



## 4. Modifier catégories

Modifier en appuyant longuement sur un bouton

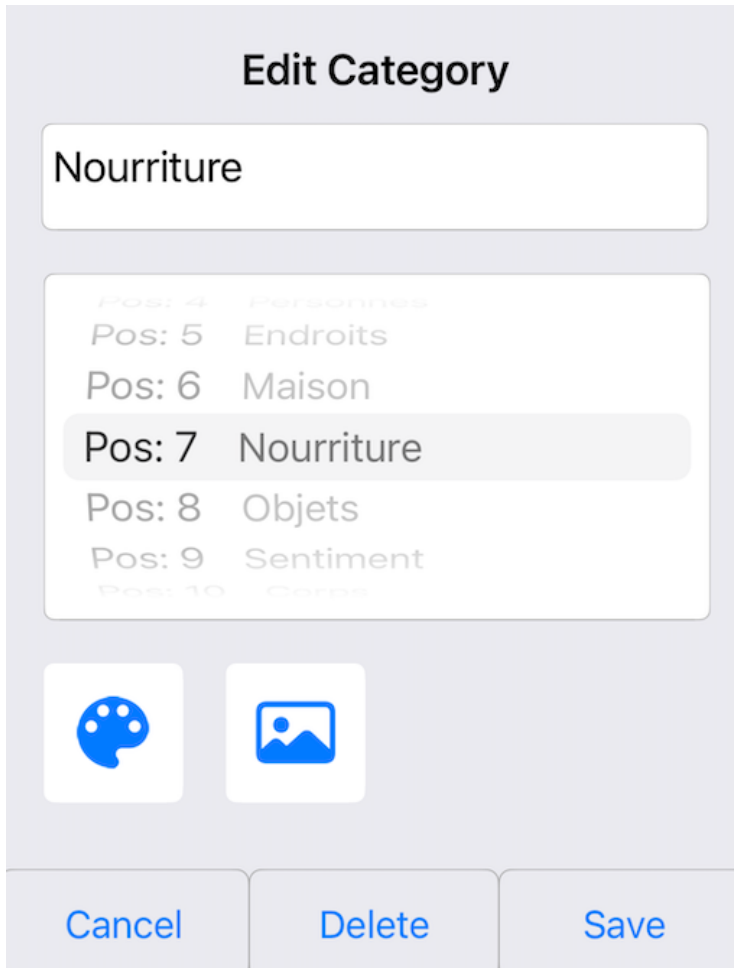

Le nom de la catégorie, la position et la couleur du bouton peuvent être modifiés.

Le bouton Image vous permet de sélectionner un symbole, un émoji ou une photo (de votre photothèque). Vous pouvez également prendre une photo. L'image sera placée sur le bouton, à côté du texte.

Lorsque vous supprimez une catégorie, les phrases qui appartiennent à cette catégorie seront également supprimées.

### Modifier dans les paramètres

Dans les paramètres, vous pouvez modifier le nom de toutes les catégories de la liste en une seule fois. Par glisser-déposer sur les 3 lignes horizontales, l'ordre des catégories peut être modifié.

## 5. Ajouter (sous) catégories ou phrases




Sur l'écran principal, vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie, sous-catégorie ou une nouvelle phrase avec le bouton d'action Ajouter.

Il est également possible d'ajouter des catégories ou des phrases dans les paramètres de l'application.



## 6. Menu des paramètres

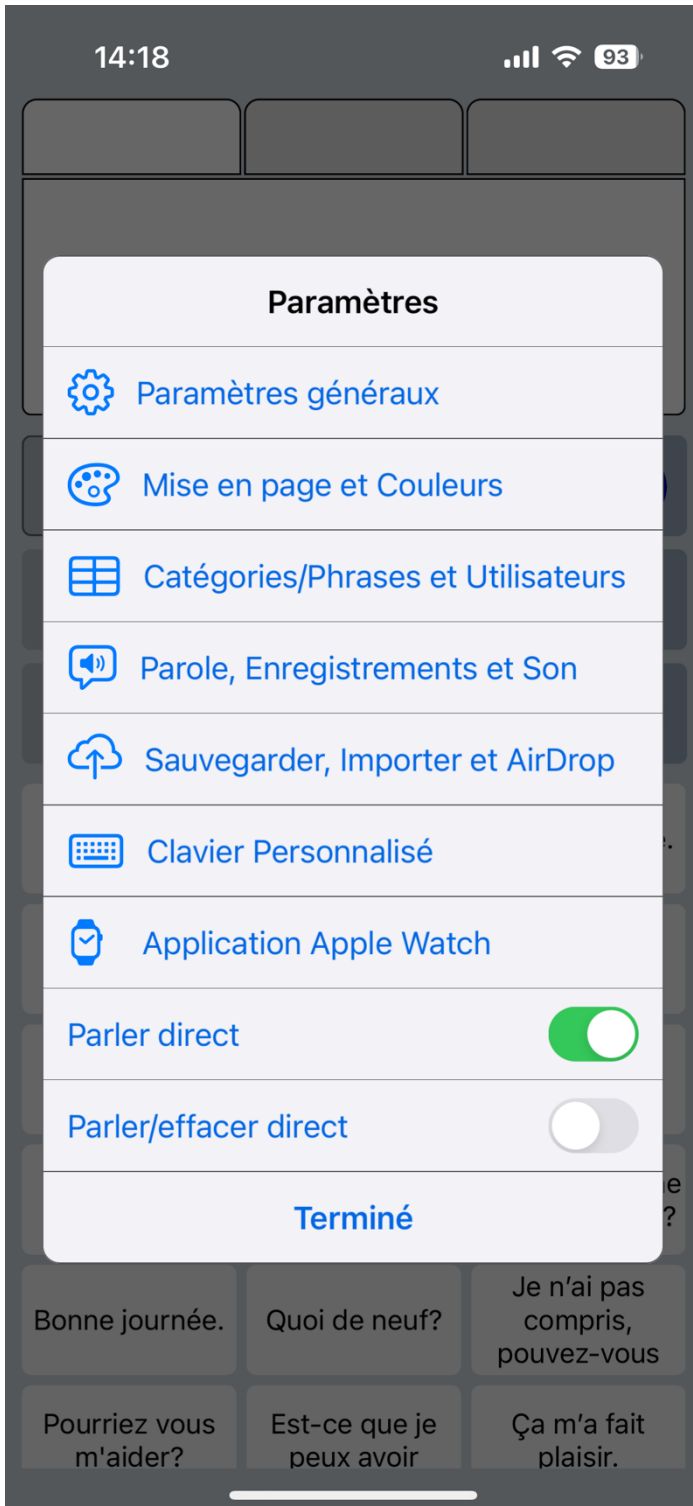

### Paramètres généraux

Y compris les paramètres pour: Récupérer phrases effacées, Recherche automatiquement, Raccourcis clavier, Mot de passe de protection.

### Mise en page et Couleurs

Pour définir la taille, la taille du texte et les couleurs des boutons et de la zone de texte.

Les couleurs et l'ordre des boutons d'action peuvent également être ajustés.

### Catégories et Phrases

Les catégories et les phrases peuvent être modifiées dans ces paramètres.

Vous pouvez également créer des profils utilisateur ici. Les profils utilisateur ont leur propre ensemble de catégories et de phrases. La voix sélectionnée est également stockée dans le profil.

Les profils utilisateur peuvent être utilisés pour un support multilingue et pour différentes personnes ou situations.

Dans ce menu de paramètres, l'historique peut également être activé, vous donnant un accès rapide aux phrases précédemment saisies.

### Parole et Son

Pour sélectionner la voix, régler la hauteur et la vitesse de la voix, sélectionner le son d'attention.

### Paramètres rapides

Le menu des paramètres contient également deux paramètres rapides.


- Parler directe: Après avoir appuyé sur un bouton avec une phrase, la phrase est immédiatement parlée.
- Parler/effacer direct: Après avoir appuyé sur un bouton avec une phrase, la phrase est immédiatement parlée puis effacée.



## 7. Recherche automatiquement

La fonction de saisie semi-automatique est importante car elle améliore l'efficacité et la rapidité de la communication.

Elle recherche vos phrases en fonction de votre saisie et affiche des suggestions de saisie semi-automatique dans une liste déroulante ou sur une ligne du clavier à l'écran.

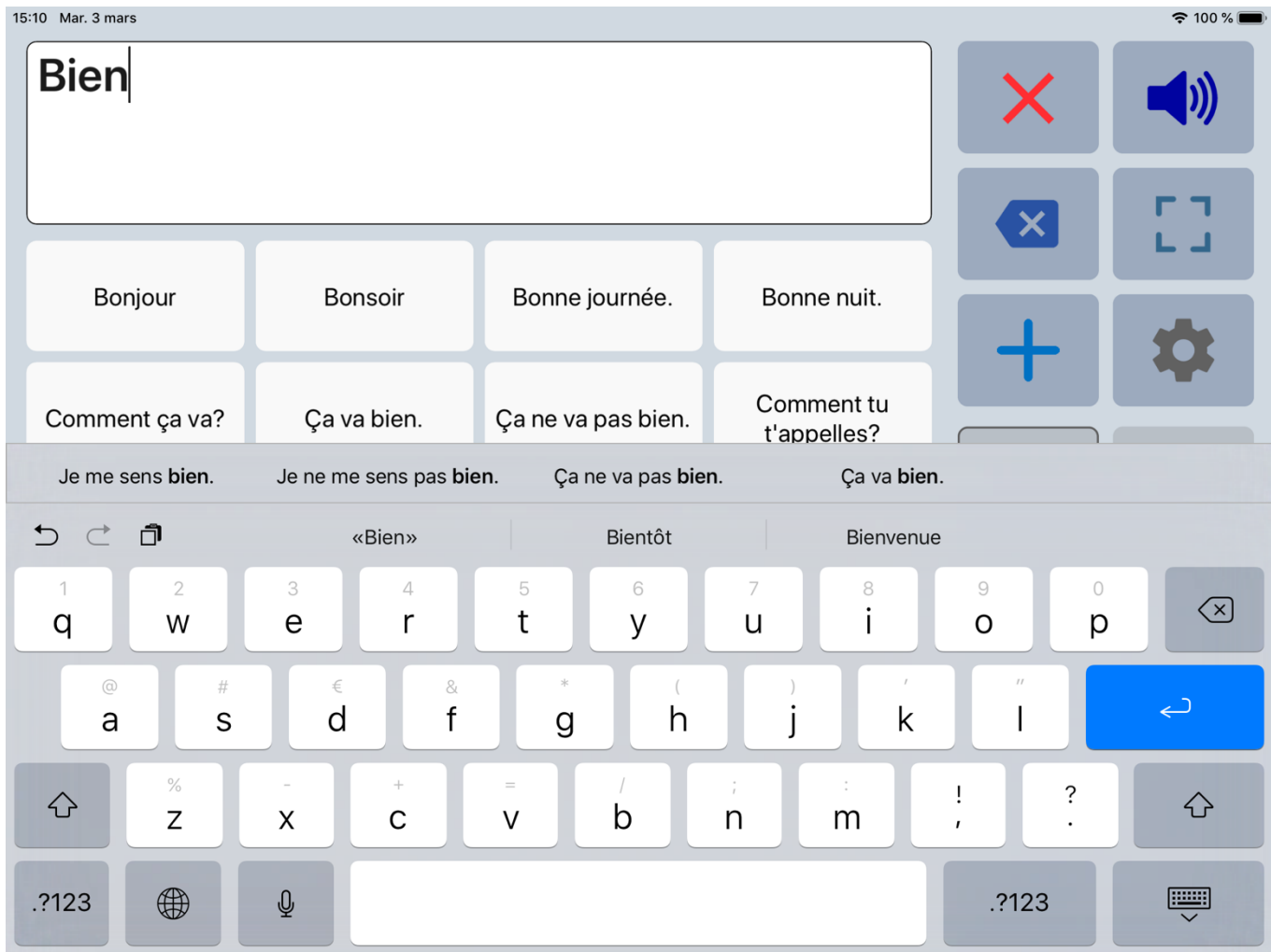

## 8. Voix

L'application utilise les voix intégrées iOS. Il y a 90 voix pour 27 langues disponibles. Il y a 8 voix françaises (5 voix de femme, 3 voix d'homme).

La voix peut être sélectionnée dans l'application, la vitesse et la hauteur de la voix sélectionnée peuvent être ajustées.

Les voix peuvent être sélectionnées après avoir été téléchargées dans les paramètres de votre iPad: Réglages > Accessibilité > Contenu énoncé > Voix.





## 9. Appels téléphoniques

L'application peut également être utilisée pendant les appels téléphoniques, FaceTime et Skype (avec iOS 13 sur votre iPhone ou iPad). Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'un deuxième appareil pour la sortie vocale.

Vous pouvez taper du texte (ou utiliser les boutons avec des phrases) et l'autre personne au téléphone peut entendre la sortie vocale synthétisée.

Pendant l'appel, la sortie vocale n'est pas audible sur votre appareil, mais l'application met en évidence les mots prononcés afin que vous puissiez suivre la progression de la sortie vocale.

## 10. Sauvegarde et AirDrop

L'application prend en charge la sauvegarde sur iCloud, Mail et avec AirDrop.

### Sauvegarde sur iCloud

Faire une sauvegarde sur iCloud régulièrement est toujours une bonne idée. La sauvegarde et la restauration peuvent également être une méthode pratique (à côté d'AirDrop) pour transférer vos catégories et phrases vers un autre appareil. Dans les paramètres de votre appareil, iCloud Drive doit être activé.

### Sauvegarde sur Mail

Sauvegarde sur Mail peut être utile si vous souhaitez envoyer une sauvegarde à une autre personne. Le courrier contient également des instructions sur la façon de restaurer la sauvegarde.

### AirDrop

Avec AirDrop, vous pouvez envoyer une sauvegarde complète (catégories, phrases, enregistrements, images) à un autre appareil ou à une autre personne. Si l'appareil récepteur n'est pas visible sur l'écran AirDrop, vous pouvez vérifier dans les paramètres de l'appareil récepteur (Général > AirDrop) si la réception AirDrop est autorisée.

### Importer enregistrements

Avec 'Restaurer enregistrements', il est également possible d'importer des enregistrements précédemment réalisés. Les formats audio suivants sont pris en charge: m4a, aac, mp3, wav.

## 11. Plus d'information

Un manuel d'utilisation plus complet (en anglais) est disponible à [www.asoft.nl](http://www.asoft.nl)