



# Spraak Assistent voor iOS

## Basis Handleiding

Een volledige gebruikershandleiding (in het Engels) is te vinden op [www.asoft.nl](http://www.asoft.nl)



## 1. Interface









De interface van het hoofdscherm bestaat uit 4 onderdelen: Het tekstvak en 3 gebieden met buttons, waar je door heen kan scrollen.

1	Tekstvak	De tekst van je bericht verschijnt in het tekstvak. Wanneer je op het tekstvak tapt, verschijnt het scherm-toetsenbord.
2	Actie buttons	Er zijn 12 actie buttons. De eerste 6 buttons zijn altijd zichtbaar, de andere buttons worden zichtbaar door naar beneden te scrollen over de actie buttons.
3	Categorieën	Scrolbaar gebied met de categorieën.
4	Zinnen	Scrolbaar gebied met de zinnen die tot de geselecteerde categorie behoren.



## 2. Actie buttons

### Overzicht

	Spreek	Spreekt de tekst in het tekstvak uit.
	Wissen	Clears the textbox.
	Wis woord	Wist het laatste woord in het tekstvak.
	Volledig scherm	Toont het bericht in het tekstvak op volledig scherm.
	Toevoegen	Opent het menu toevoegen: nieuwe zin, huidige zin opslaan, nieuwe categorie.
	Instellingen	Opent het instellingen menu.
	Bewerk zin	Bewerk de laatst aangeklikte zin.
	Attentie geluid	Het geluid kan worden geselecteerd in de instellingen 'Sprak en geluid'.
	Deel zin	Deel de zin via e-mail, tekst of sociale media.
	Roteer tekst	Draai de tekst om om je bericht aan de persoon tegenover je te tonen.
	Schermttoetsenbord	Toont het schermttoetsenbord.
	Gebruikers	Wissel tussen gebruikersprofielen.
	Zinnen ordenen	De buttons met zinnen opnieuw ordenen (slepen en neerzetten).



### 3. Bewerk zinnen

Bewerk door lang op een button te drukken

#### Bewerk zin

Ik wil graag koffie met melk.

Label:  
koffie melk

Categorie / positie:

	Pos: 12	show
	Pos: 13	koffie
Algemeen	Pos: 14	melk
Eten/drinken	Pos: 15	koffie melk
Woorden	Pos: 16	water
Werk woorden	Pos: 17	limonade

[Annuleren](#) [Verwijder](#) [Opslaan](#)

**Button kleur:** Om de kleur van de button te wijzigen.

**Button afbeelding:** biedt de opties om een afbeelding te selecteren (uit je fotobibliotheek), om een Emoji te selecteren of een foto te maken. De afbeelding wordt op de button naast de tekst geplaatst.


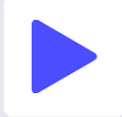
**Button recorder:** toont het recorderscherf waar je een spraakopname kunt maken die wordt afgespeeld wanneer je op de button met de zin op het hoofdscherf drukt. Het is ook mogelijk om een eerder gemaakte spraakopname te selecteren.

#### Recorder

Spraakopname:  
Hallo, hoe gaat het?.m4a

[Deselecteer](#)

0.0

[Annuleren](#) [Ok](#)

**Zin:** De zin die wordt uitgesproken en/of in het tekstvak wordt geplaatst.

**Label:** De tekst die op de button wordt geplaatst. Als het label leeg is, wordt de zin op de button geplaatst.

**Categorie/positie:** Voor het aanpassen van de categorie en positie.



### 3. Bewerk zinnen

#### Bewerk in de instellingen

Als je naar de instellingen 'Categorieën en zinnen' gaat, vervolgens naar Categorieën en vervolgens een categorie selecteert, wordt de lijst met alle zinnen die bij de geselecteerde categorie horen, weergegeven.

**Bewerk** : De bewerkingsmodus waar je alle zinnen in één keer kunt wijzigen.

**++** : Toont het scherm waar je tot 10 zinnen in één keer kunt toevoegen.

**+** : Toont het scherm waar je een zin kan toevoegen.

Lijst:

Terug	Wijzig	++	+
Mijn naam is ...			
Mijn telefoon nummer is ...			
Mijn e-mailadres is ...			
Mijn adres is ...			
Ik woon in ...			
Hallo, hoe gaat het?			
Leuk je te ontmoeten.			
Wat is je naam?			
Het gaat goed, dank je.			
Ik heb een spraak probleem.			
Ik gebruik dit apparaat om te praten.			
Goede morgen			

Bewerk:

Terug	Verwijder (4)	Kleur (4)	Bewaar
<input type="radio"/>	Mijn naam is ...		
<input checked="" type="radio"/>	Mijn telefoon nummer is ...		
<input checked="" type="radio"/>	Mijn e-mailadres is ...		
<input checked="" type="radio"/>	Mijn adres is ...		
<input checked="" type="radio"/>	Ik woon in ...		
<input type="radio"/>	Hallo, hoe gaat het?		
<input type="radio"/>	Leuk je te ontmoeten.		
<input type="radio"/>	Wat is je naam?		
<input type="radio"/>	Het gaat goed, dank je.		
<input type="radio"/>	Ik heb een spraak probleem.		
<input type="radio"/>	Ik gebruik dit apparaat om t...		
<input type="radio"/>	Goede morgen		

- Je kunt ook meerdere zinnen selecteren en de kleur van de geselecteerde zinnen wijzigen of de geselecteerde zinnen verwijderen.
- Door slepen en neerzetten op de 3 horizontale lijnen, kan de volgorde van de zinnen worden gewijzigd.



## 4. Bewerk Categorieën

Bewerk door lang op een button te drukken



Door lang op een categorie button op het hoofdscherm te drukken, kan de categorie worden gewijzigd of verwijderd.

De naam van de categorie en de positie kunnen worden gewijzigd.


Met de Afbeelding button kan je een Symbool, Emoji of Foto (uit je fotobibliotheek) selecteren. Je kan ook een Foto maken. De afbeelding wordt op de button naast de tekst geplaatst.

Wanneer je een categorie verwijdert, worden de zinnen die bij die categorie horen ook verwijderd.

### Bewerk in de instellingen

In de instellingen kan je de naam van alle categorieën in de lijst in één keer wijzigen. Verder kan in de lijst de volgorde van de categorieën worden gewijzigd door slepen en neerzetten met de 3 horizontale lijnen.

## 5. Toevoegen (sub)categorieën of zinnen

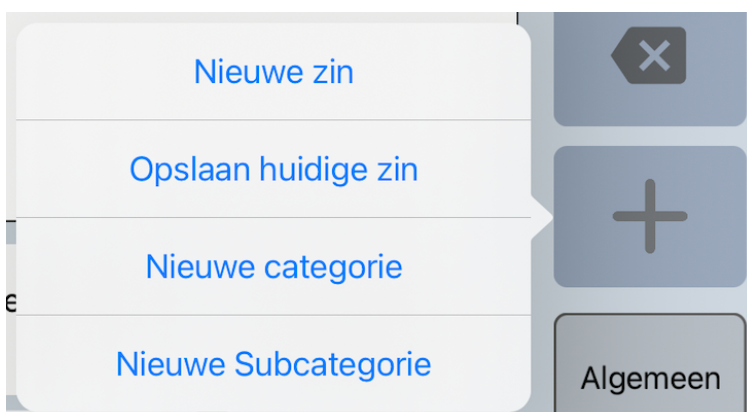


Op het hoofdscherm kan je een nieuwe categorie, een subcategorie of nieuwe zin toevoegen met de actie button Toevoegen.

Het is ook mogelijk om categorieën of zinnen toe te voegen in de instellingen van de app.



## 6. Instellingen menu

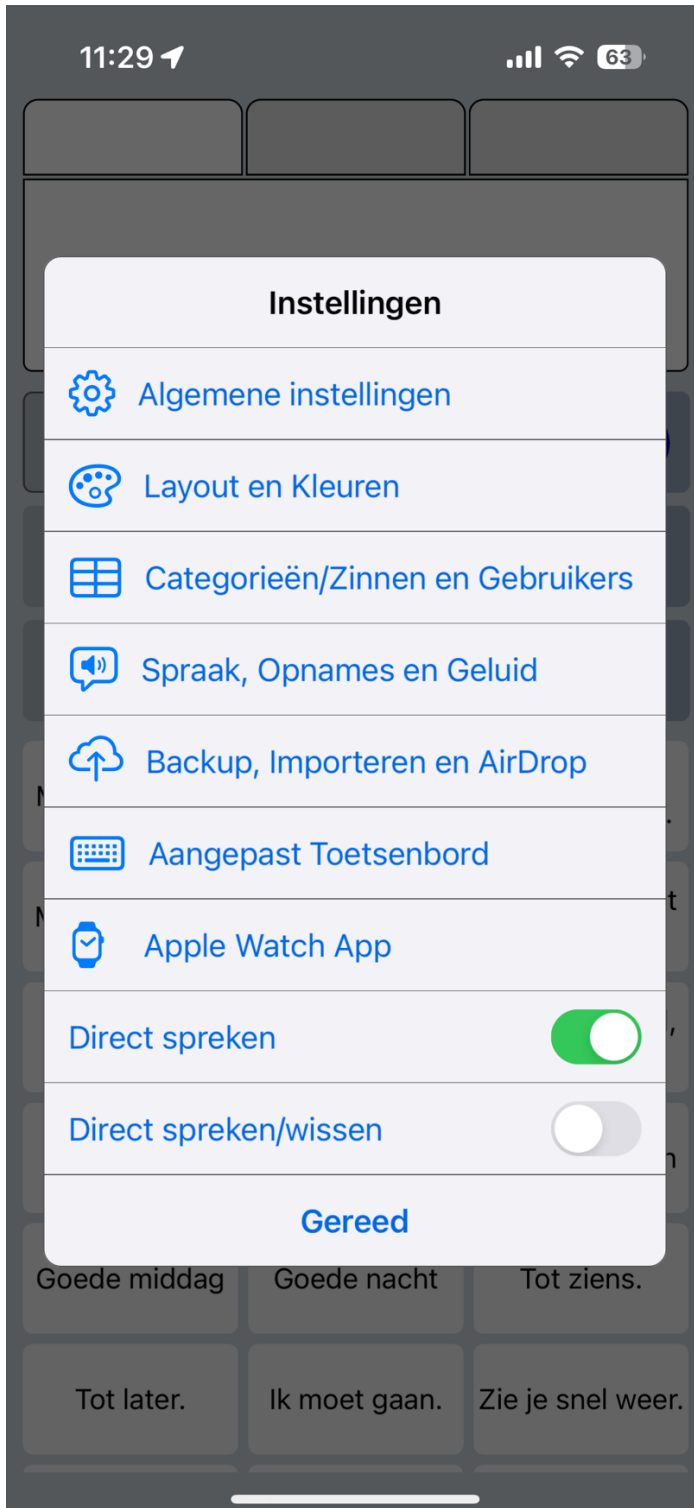

### Algemene instellingen

Met onder andere de instellingen voor: Herstel wissen, Automatisch zoeken, Toetsenbord sneltoetsen, Wachtwoord beveiliging van de instellingen.

### Layout en Kleuren

Voor het instellen van de grootte, de tekstgrootte en de kleuren van de buttons en het tekstvak. De kleuren en de volgorde van de actie buttons kunnen ook worden aangepast.

### Categorieën en zinnen

In deze instellingen kunnen de categorieën en zinnen worden bewerkt.

Je kan hier ook gebruikersprofielen maken. Gebruikersprofielen hebben hun eigen set categorieën en zinnen. De geselecteerde stem wordt ook opgeslagen in het profiel.

De gebruikersprofielen kunnen worden gebruikt voor meertalige ondersteuning en voor verschillende personen of situaties.

Verder kan in dit instellingen menu ook geschiedenis worden ingeschakeld voor snelle toegang tot eerder getypte zinnen.

### Spraak en geluid

Voor het selecteren van de stem, het aanpassen van de toonhoogte en snelheid van de stem, het selecteren van het attentiegeluid.

### Snelle instellingen

Het instellingen menu bevat ook twee snelle instellingen.


- Direct spreken: Na het tikken op een knop met een zin, wordt de zin onmiddellijk uitgesproken.
- Direct spreken/wissen: Nadat je op een knop met een zin hebt getikt, wordt de zin onmiddellijk uitgesproken en vervolgens gewist.



## 7. Automatisch zoeken

De 'Automatisch zoeken' functie zoekt automatisch door je zinnen, op basis van wat je typt.

Je kan ervoor kiezen de resultaten op een extra balk op het schermtoetsenbord te plaatsen of te tonen in een keuzelijst.

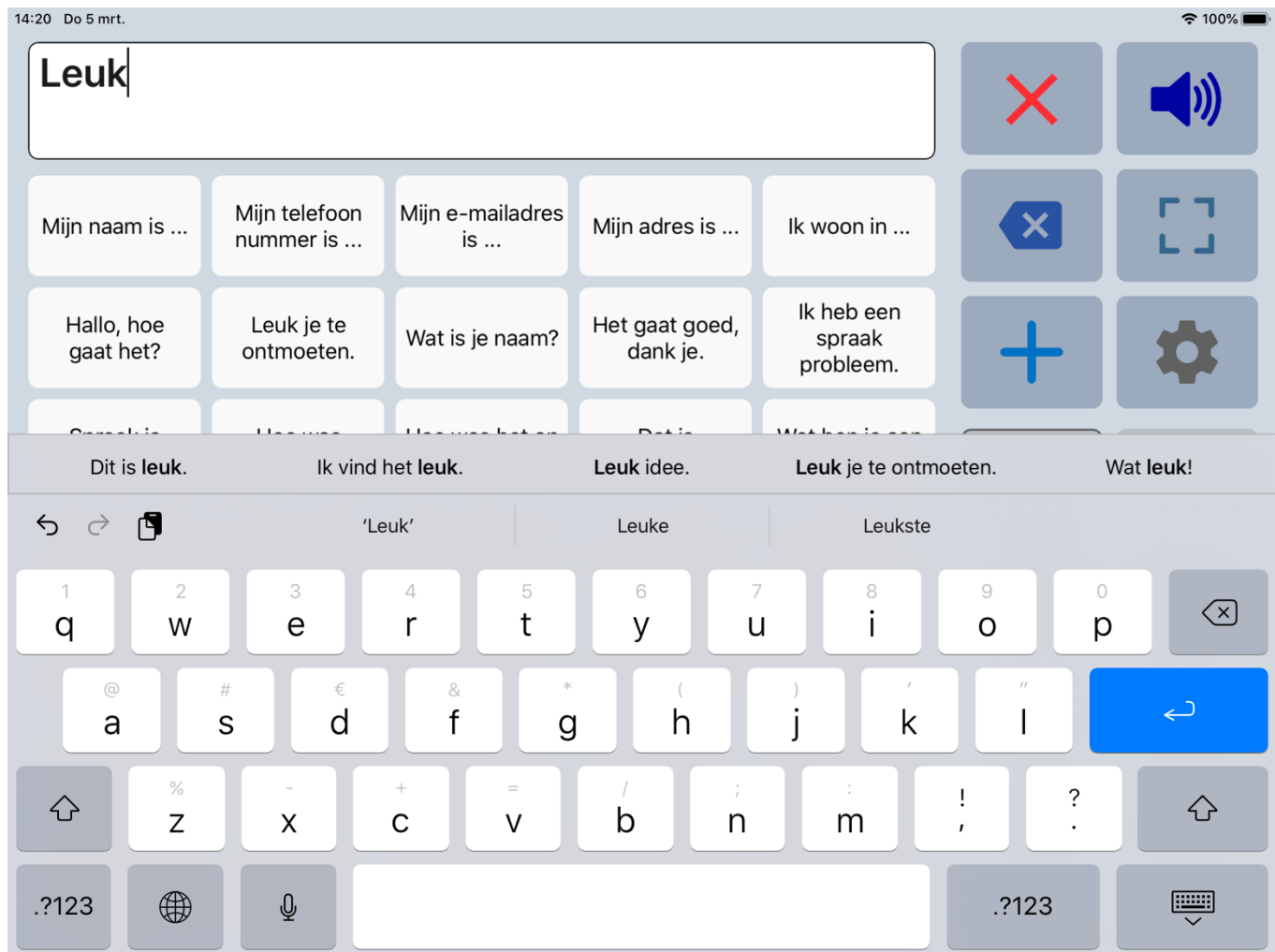

## 8. Stemmen

De app maakt gebruik van de iOS systeem stemmen.

De stem kan in de app worden geselecteerd, de snelheid en toonhoogte van de geselecteerde stem kunnen worden aangepast.

De stemmen kunnen worden geselecteerd nadat ze zijn gedownload in de instellingen van je iPad: Instellingen > Toegankelijkheid > Gesproken materiaal > Stemmen.

De app ondersteunt ook ElevenLabs stemmen, waardoor je de optie krijgt om zeer realistische professionele AI stemklonen te gebruiken.





## 9. Telefoongesprekken

De app kan ook worden gebruikt tijdens een telefoon-, FaceTime- en Skype-gesprek (met iOS 13 op je iPhone of iPad). Dit betekent dat je geen tweede apparaat meer nodig hebt voor de spraakuitvoer.

Je kan tekst typen (of de buttons met zinnen gebruiken) en de andere persoon aan de telefoon kan de gesynthetiseerde spraak horen.

De spraakuitvoer is hoorbaar voor de andere persoon aan de telefoon en ook op uw iPhone (als deze op de luidspreker staat).

## 10. Backup en AirDrop

De app ondersteunt backup naar iCloud, Mail en met AirDrop.

### Backup naar iCloud

Regelmatig een backup maken naar iCloud is altijd een goed idee. Backup en terugzetten kan ook een handige methode zijn (naast AirDrop) om je categorieën en zinnen over te zetten naar een ander apparaat. In de instellingen van je iPad moet iCloud-drive zijn ingeschakeld.

### Backup naar Mail

Backup naar Mail kan handig zijn als je een backup naar een andere persoon wil verzenden. De Mail bevat ook instructies voor het terugzetten van de backup.

### AirDrop

Met AirDrop kan je een complete backup (categorieën, zinnen, opnames, afbeeldingen) naar een ander apparaat of persoon verzenden. Als het ontvangende apparaat niet zichtbaar is op het AirDrop-scherm, kan je in de instellingen van het ontvangende apparaat (Algemeen > AirDrop) controleren of AirDrop-ontvangst is toegestaan.

### Importeer Recordings

Met 'Terugzetten opnames' is het ook mogelijk om eerder gemaakte opnames te importeren. De app ondersteunt de volgende audio-formaten: m4a, aac, mp3, wav.

## 11. Meer informatie

Een volledige gebruikershandleiding (in het Engels) is te vinden op [www.asoft.nl](http://www.asoft.nl)