



SprachAssistent für iOS

Kurzanleitung

Eine vollständige Bedienungsanleitung (auf Englisch) finden Sie unter www.asoft.nl



1. Schnittstelle
















Die App verfügt über über ein Textfeld und 3 Bereiche mit Tasten: Phrasen, Kategorien und Aktionstasten. Sie können in diesen Bereichen scrollen um weitere Tasten anzuzeigen.

1	Textfeld	Ihre Nachricht wird im Textfeld angezeigt. Wenn Sie in das Textfeld tippen, wird die Bildschirmtastatur angezeigt.
2	Aktionstasten	Es gibt 12 Aktionstasten. Die ersten 6 Tasten sind immer sichtbar, die anderen Tasten können durch Scrollen über die Aktionstasten sichtbar gemacht werden.
3	Kategorien	Bereich mit den Kategorien.
4	Sätzen	Bereich mit den Sätzen, die zur ausgewählten Kategorie gehören.



2. Aktionstasten

Überblick

	Sprechen	Spricht den Text im Textfeld.
	Löschen	Löscht das Textfeld.
	Wort löschen	Löscht das letzte Wort im Textfeld.
	Vollbild	Zeigt die Nachricht im Vollbild-modus des Textfelds an.
	Hinzufügen	Menü zum Hinzufügen: Neue Phrase, Aktuelle Phrase speichern, Neue Kategorie.
	Einstellungen	Öffnet das Einstellungsmenü.
	Satz ändern	Bearbeiten Sie die zuletzt angeklickte Phrase.
	Aufmerksamkeitston	Der Ton kann in den Einstellungen für Sprache und Ton ausgewählt werden.
	Satz teilen	Teilen Sie den Satz mit E-Mails, Texten oder sozialen Medien.
	Text umdrehen	Drehen Sie den Text um Ihre Nachricht der Person gegenüber von Ihnen anzuzeigen.
	Bildschirm tastatur	Öffnet die Bildschirmtastatur.
	Benutzers	Wechseln Sie zwischen Benutzerprofilen.
	Sätze neu anordnen	Ordnen Sie die Tasten mit Sätzen neu an (per Drag & Drop).



3. Satz bearbeiten

Bearbeiten durch langes Drücken einer Taste

Bearbeiten Satz

Kaffee mit Milch bitte.

Beschriftung:

Kaffee Milch

Kategorie / Position:

	Pos: 12	Zucker
	Pos: 13	Orangensaft
Allgemein	Pos: 14	Apfelsaft
Lebensmittel	Pos: 15	Kaffee Milch
Wörter	Pos: 16	Limonade
Verben	Pos: 17	ein Sandwich
Gefühle	Pos: 18	Karotten

Abbrechen Löschen Speichern

Taste Farbe: Zum Ändern der Farbe der Taste.

Taste Bild: Gibt die Optionen zum Auswählen eines Bilds (aus Ihrer Fotobibliothek), zum Auswählen eines Emoji oder zum Aufnehmen eines Fotos. Das Bild wird auf die Taste neben dem Text platziert.

Taste Recorder: Zeigt den Bildschirm des Recorders an, auf dem Sie eine Sprachaufnahme erstellen können, die abgespielt wird, wenn Sie die Taste auf dem Hauptbildschirm drücken. Es ist auch möglich, eine zuvor erstellte Sprachaufnahme auszuwählen.


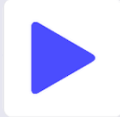
Recorder

Sprachaufnahme:

Hallo, wie geht es dir?.m4a

Abwählen

0.0

Abbrechen Ok

Satz: Der Satz der gesprochen und/oder in das Textfeld eingefügt wird.

Beschriftung: Der Text der auf die Taste platziert wird. Wenn die Beschriftung leer ist, wird der Satz auf die Taste platziert.

Kategorie/Position: Zum Einstellen der Kategorie und Position.



3. Satz bearbeiten

Bearbeiten in den Einstellungen

Wenn Sie zu den Einstellungen für 'Kategorien und Phrasen' und dann zu Kategorien gehen und dann eine Kategorie auswählen, wird die Liste aller Sätze angezeigt, die zur ausgewählten Kategorie gehören.

Bearbeiten : Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, in dem Sie alle Phrasen auf einmal ändern können.

++ : Zeigt den Bildschirm an, auf dem Sie bis zu 10 Sätze auf einmal hinzufügen können.

+ : Zeigt den Bildschirm an, auf dem Sie eine Phrase hinzufügen können.

Liste:

Zurück	Bearbeiten	++	+
Mein Name ist ...			
Meine Telefon nummer ist ...			
Meine E-Mail lautet ...			
Meine Adresse ist ...			
Ich lebe in ...			
Hallo, wie geht es dir?			
Schön euch zu treffen.			
Was ist dein Name?			
Mir geht es gut, danke.			
Ich habe ein Sprach problem.			
Ich verwende dieses Gerät zum Sprechen.			
Guten Morgen			
Guten Tag			

Bearbeiten:


Zurück	Löschen (4)	Farbe (4)	Sichern
<input type="radio"/>	Mein Name ist ...		
<input checked="" type="radio"/>	Meine Telefon nummer ist ...		
<input checked="" type="radio"/>	Meine E-Mail lautet ...		
<input checked="" type="radio"/>	Meine Adresse ist ...		
<input checked="" type="radio"/>	Ich lebe in ...		
<input type="radio"/>	Hallo, wie geht es dir?		
<input type="radio"/>	Schön euch zu treffen.		
<input type="radio"/>	Was ist dein Name?		
<input type="radio"/>	Mir geht es gut, danke.		
<input type="radio"/>	Ich habe ein Sprach problem.		
<input type="radio"/>	Ich verwende dieses Gerät zum...		
<input type="radio"/>	Guten Morgen		
<input type="radio"/>	Guten Tag		

- Sie können mehrere Phrasen auswählen und die Farbe der ausgewählten Phrasen ändern oder die ausgewählten Phrasen löschen.
- Durch Drag & Drop auf die 3 horizontalen Linien kann die Reihenfolge der Phrasen geändert werden.



4. Kategorien bearbeiten

Bearbeiten durch langes Drücken einer Taste

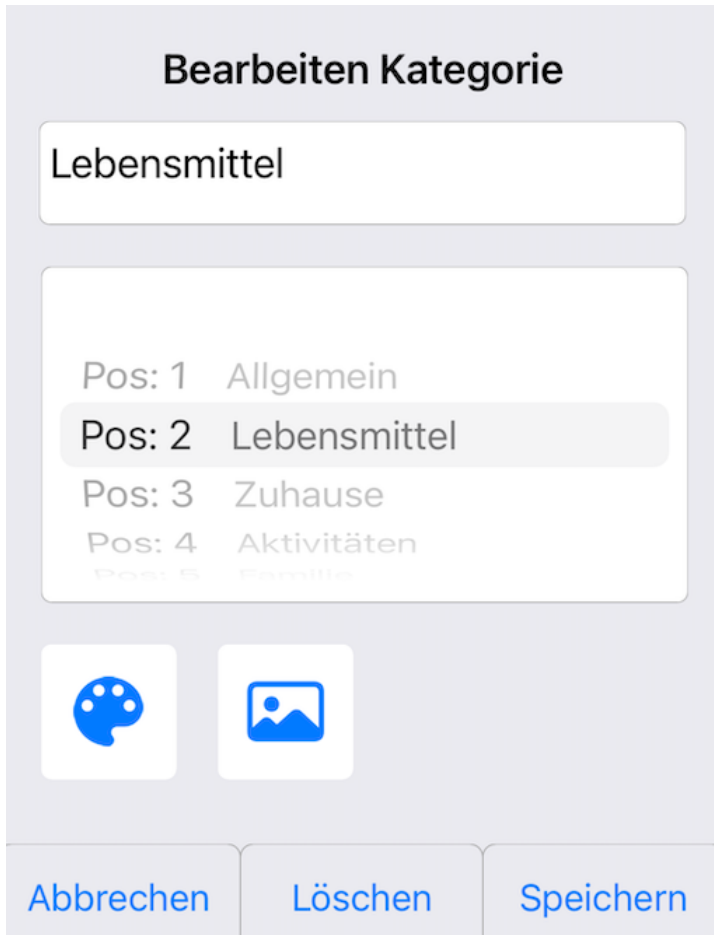

Der Name der Kategorie und die Position können geändert werden.

Der Name der Kategorie, die Position und die Farbe können geändert werden.


Mit dem Bild-Taste können Sie ein Symbol, ein Emoji oder ein Foto (aus Ihrer Fotobibliothek) auswählen. Sie können auch ein Foto aufnehmen. Das Bild wird auf dem Button neben dem Text platziert.

Wenn Sie eine Kategorie löschen, werden auch die Phrasen gelöscht, die zu dieser Kategorie gehören.

Bearbeiten in den Einstellungen

In den Einstellungen können Sie den Namen aller Kategorien in der Liste auf einmal ändern. Durch Drag & Drop auf die 3 horizontalen Linien kann die Reihenfolge der Kategorien geändert werden.

5. Kategorien oder Phrasen hinzufügen

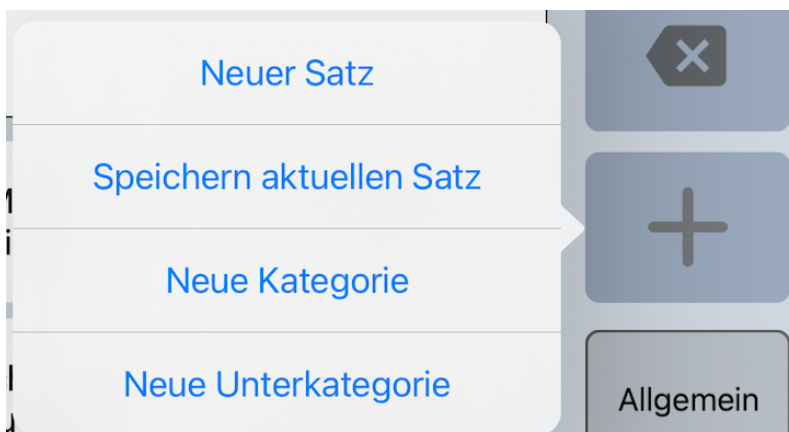


Auf dem Hauptbildschirm können Sie eine neue Kategorie, Unterkategorie oder neue Phrase mit der Aktionstaste hinzufügen.

Es ist auch möglich, Kategorien oder Phrasen in den Einstellungen der App hinzuzufügen.



6. Einstellungsmenü

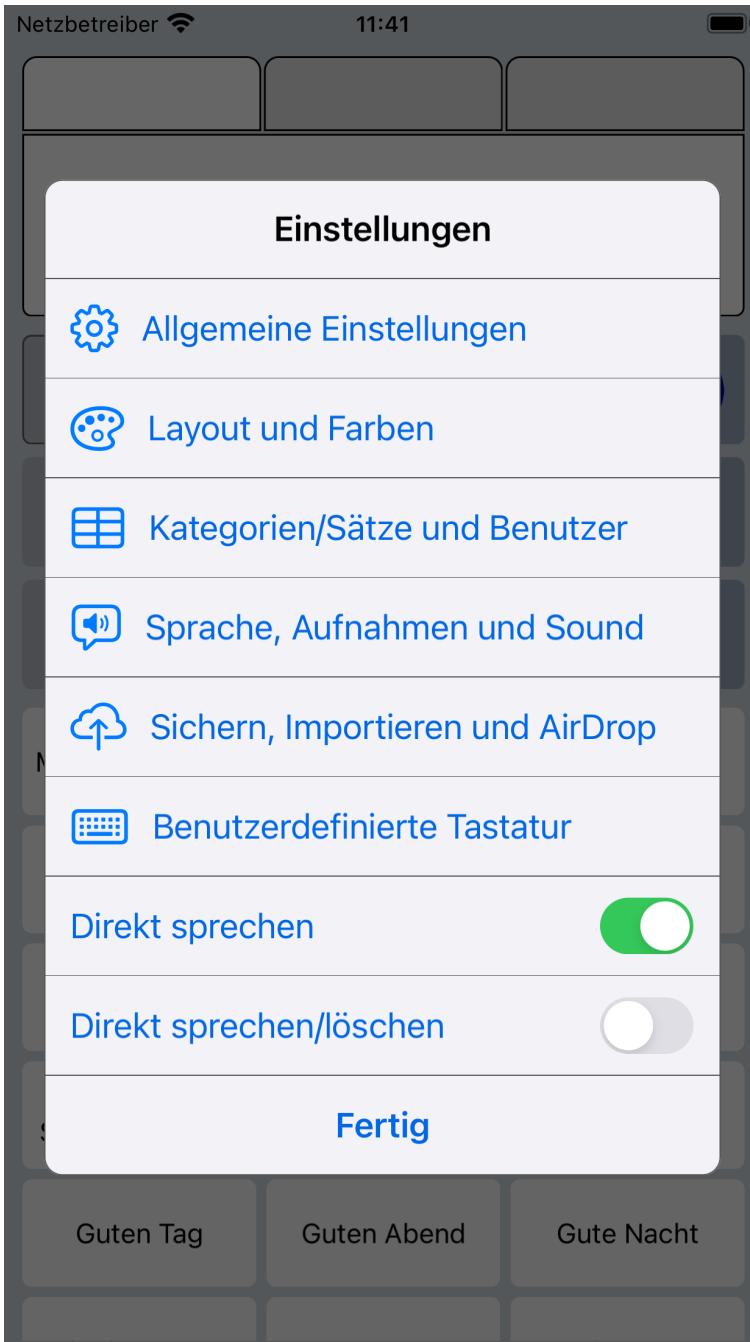

Allgemeine Einstellungen

Einschließlich der Einstellungen für: Rückgängig machen Löschen, automatische Suche, Tastaturkürzel, Passwortschutz der Einstellungen.

Layout und Farben

Zum Einstellen von Größe, Textgröße und Farben der Tasten und des Textfelds.

Die Farben und die Reihenfolge der Aktionstasten können ebenfalls angepasst werden.

Kategorien und Sätze

Die Kategorien und Sätze können in diesen Einstellungen bearbeitet werden.

Hier können Sie auch Benutzerprofile erstellen. Benutzerprofile haben ihre eigenen Kategorien und Sätze. Die ausgewählte Stimme wird auch im Profil gespeichert.

Die Benutzerprofile können zur mehrsprachigen Unterstützung und für verschiedene Personen oder Situationen verwendet werden.

Darüber hinaus kann der Verlauf in diesem Einstellungsmenü für den schnellen Zugriff auf zuvor eingegebene Sätze aktiviert werden.

Sprache und Sound

Zum Auswählen der Stimme, Anpassen der Tonhöhe und Geschwindigkeit der Stimme, Auswählen des Aufmerksamkeitstons.

Schnelleinstellungen

Das Einstellungsmenü enthält auch zwei Schnelleinstellungen.


- **Direkt sprechen:**
Nach dem Tippen auf eine Taste mit einem Satz wird der Satz sofort gesprochen.
- **Direkt sprechen/löschen:**
Nach dem Tippen auf eine Taste mit einem Satz wird der Satz sofort gesprochen und dann gelöscht.



7. Automatische Suche

Die Autosuchfunktion ist wichtig, da sie die Kommunikationseffizienz und -geschwindigkeit verbessert.

Die Funktion durchsucht Ihre eingegebenen Phrasen und platziert die gefundenen Sätze in einer Dropdown-Liste oder in einer Zeile auf der Bildschirmtastatur an.

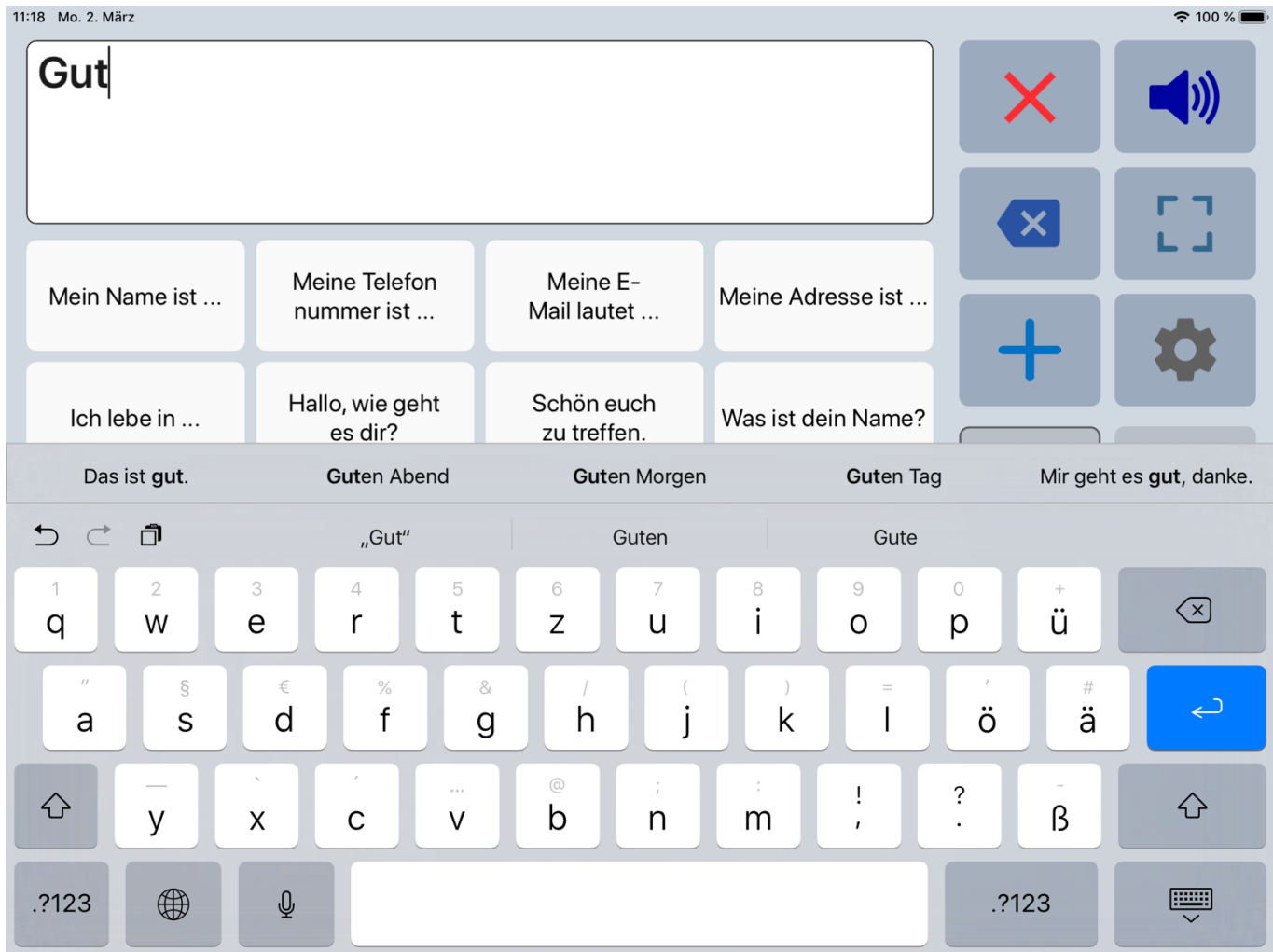

8. Stimmen

Die App nutzt die eingebauten iOS Stimmen. Es gibt 93 Stimmen für 27 Sprachen. Hierbei sind auch 5 deutsche Stimmen, 3 männliche und 2 weibliche.

Die Stimme kann in der App ausgewählt werden, die Geschwindigkeit und Tonhöhe der ausgewählten Stimme können angepasst werden.

Die Stimmen können ausgewählt werden, nachdem sie in den Einstellungen Ihres iPad heruntergeladen wurden: Einstellungen > Bedienungshilfen > Gesprochene inhalte > Stimmen.



9. Telefonanrufe

Die App kann auch während Telefon, FaceTime und Skype Anrufen verwendet werden (mit iOS 13 auf Ihrem iPhone oder iPad). Dies bedeutet, dass Sie kein zweites Gerät mehr für die Sprachausgabe benötigen.

Sie können Text eingeben (oder die Tasten mit Sätzen verwenden) und die andere Person am Telefon kann die synthetisierte Sprache hören.

Während des Anrufs ist die Sprachausgabe auf Ihrem Gerät nicht hörbar, aber die App hebt die gesprochenen Wörter hervor, damit Sie den Fortschritt der Sprache verfolgen können.

10. Sicherung und AirDrop

Die App unterstützt Sicherung zu iCloud, Mail und mit AirDrop.

Sicherung zu iCloud

Es ist immer eine gute Idee, regelmäßig Sicherung zu iCloud zu erstellen. Sichern und Wiederherstellen kann auch eine gute Methode sein (neben AirDrop), um Ihre Kategorien und Sätze auf ein anderes Gerät zu übertragen. In den Einstellungen Ihres Geräts muss iCloud Drive eingeschaltet sein.

Sicherung zu Mail

Sicherung zu Mail kann nützlich sein, wenn Sie eine Sicherung an eine andere Person senden möchten. Die Mail enthält auch Anweisungen zum Wiederherstellen der Sicherung.

AirDrop

Mit AirDrop können Sie ein vollständiges Sicherung (Kategorien, Sätze, Aufnahmen, Bilder) an ein anderes Gerät oder eine andere Person senden. Wenn das Empfangsgerät auf dem AirDrop-Bildschirm nicht sichtbar ist, können Sie in den Einstellungen des Empfangsgeräts (Allgemein > AirDrop) prüfen, ob AirDrop-Empfang zulässig ist.

Aufnahmen importieren

Mit 'Aufnahmen wiederherstellen' ist es auch möglich, zuvor gemachte Aufnahmen zu importieren. Die App unterstützt die folgenden Audioformate: m4a, aac, mp3, wav.

11. Mehr Informationen

Eine umfassendere Bedienungsanleitung (auf Englisch) finden Sie auf www.a-soft.nl